

Gebruiksaanwijzing Moorkussen Dental



Warmtetherapie

Opwarmen in een waterbad:

Leg het modderkussen in een grote kom of pan met een inhoud van 3 liter of meer gebruiken. Vul de kom of pan met minstens 1,5 l kokend water tot het kussen volledig bedekt is. Al na ongeveer 10 minuten is het modderkussen klaar voor gebruik. Neem het nu met een pollepel of het door u gebruikte voorwerp uit de pan en droog het af.

Opwarmen in de magnetron: Leg het modderkussen in de magnetron. Let goed op dat het niet in aanraking komt met metalen onderdelen en dat de draaischijf niet geblokkeerd wordt. Zet de magnetron op 600 Watt conform de aanwijzingen van de producent van uw magnetron. Verwarm het modderkussen hooguit één minuut. Neem het kussen vervolgens uit de magnetron en kneed het goed. Herhaal dit proces indien nodig tot uw modderkussen de gewenste temperatuur heeft bereikt.

Koudetherapie:

Koel het modderkussen minstens 2 uur in de koelkast.

Nota!!!!: wanneer u een moorkussen opwarmt in een microgolfoven of bain marie, zorg er dan voor dat het kussen niet tegen de rand van het toestel komt. De plastic van het moorkussen kan smelten waardoor de moor zal uitdrogen en het kussen niet meer bruikbaar is. Kalijn is niet verantwoordelijk voor schade aan het moorkussen na gebruik.